

Kurzbeschreibung Nex-Load/ KS-Xs



1. Nex-Load aus der sterilen Verpackung entnehmen. Unbedingt der sterilen Schwester überreichen- nicht auf den Tisch fallen lassen
2. Nex-Load am mittigen Körper greifen und aus der weißen Halterung entnehmen
3. Nex-Load umdrehen, so dass die IOL zu sehen ist
4. OVD einfüllen (siehe Abbildung) nur so viel, dass die Optik der IOL bedeckt ist
5. Den Stempel unbedingt einmal nach hinten ziehen, um sicherzustellen, dass die IOL korrekt geladen werden kann / System wieder umdrehen
6. Schutzkappe entfernen
7. Unterseite der Kartusche mit dem Zeigefinger stabilisieren und den Ladeknopf mit dem Daumen kräftig drücken
8. Den Stempel mit der weißen Kappe gerade bis zum Kontakt des Gewindes vorschieben
9. Dann im Uhrzeigersinn nach rechts in das Gewinde drehen bis die vordere Haptik der IOL **4 bis 6 mm** von der Kartuschenspitze entfernt ist
10. Ohne Wartezeit implantieren- die Kartuschenspitze bevel down- 2mm oder tiefer in die Inzision einführen

